

# Ivoclean

Належне очищення після примірки



| Ефективний | Універсальний | Простий




# Ivoclean

Ivoclean - це ефективна та універсальна паста для очищення адгезивних поверхонь ортопедичних реставрацій після примірки - для оптимальної адгезивної цементації.

Забруднення поверхні реставрації слиною неможливо запобігти під час пробної припасовки. Однак це створює проблему під час подальшої, остаточної адгезивної фіксації непрямі реставрації.

Очищення забруднених слиною поверхонь протравлювальним гелем з фосфорною кислотою без проблем працює лише зі склокерамікою. Однак цей метод очищення протипоказаний для кераміки з оксиду цирконію та сплавів недорогоцінних металів через дезактивацію їхньої поверхні фосфорною кислотою.

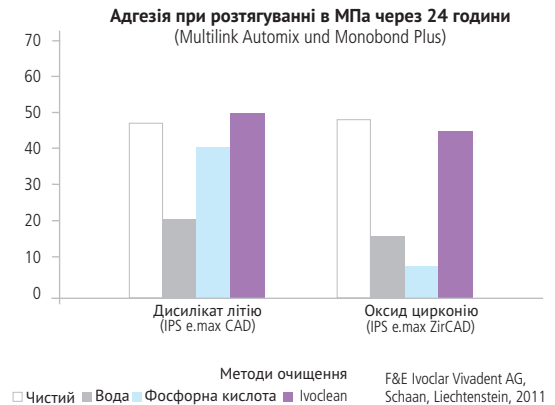

## ЕФЕКТИВНИЙ

За допомогою Ivoclean можна ефективно очистити забруднені слиною контактні поверхні реставрації і таким чином створити основу для довговічного, міцного зв'язку між адгезивним фіксуючим матеріалом і реставрацією.

## УНІВЕРСАЛЬНИЙ

Ivoclean ефективний для всіх реставраційних матеріалів:

- Склокераміка
- Кераміка з оксиду цирконію
- Кераміка з оксиду алюмінію
- Сплави дорогоцінних металів
- Сплави без дорогоцінних металів
- Непрямі композитні реставрації

## ПРОСТИЙ


Нанесіть Ivoclean на контактну поверхню реставрації, залиште на 20 секунд, а потім ретельно змийте водою. Нарешті, висушіть контактну поверхню повітрям, що не містить олії.



Примірка



Нанесіть Ivoclean і залиште на 20 секунд

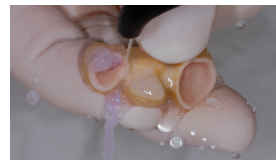

Змийте



Висушування