

Опис

Ivoclean® — універсальна чистяча паста, яка підходить для неабразивного очищення фіксаційних поверхонь ортопедичних реставрацій після інтраорального приміряння.

Отже, вона допомагає досягнути надійного адгезивного цементування.

Склад

Дисперсія часточок оксидів металу у воді.

Показання

Екстраоральне очищення попередньо оброблених керамічних і металевих поверхонь реставрацій, забруднених під час інтраорального приміряння.

Протипоказання

Застосування Ivoclean протипоказано:

- у разі неможливості застосування зазначеної методики;
- якщо очищення виконується інтраорально;
- для очищення реставрацій, які контактують із силіконовими пастами.

Взаємодія з іншими препаратами

Після очищення фіксаційний засіб потрібно знову нанести на поверхні, які раніше було силанізовано й підготовлено.

Застосування

Перед використанням необхідно струсити пляшку.

Незалежно від того, чи було підготовлено реставрації заздалегідь, їх потрібно очистити згідно з наведеним нижче протоколом:

- Після приміряння ретельно промийте реставрацію водою за допомогою водорозпилювача й висушіть за допомогою повітря без домішок олії.
- Покрийте всю фіксаційну поверхню реставрації шаром Ivoclean за допомогою мікрощітки або трубки.
- Зачекайте 20 секунд, поки засіб Ivoclean очистить поверхню, а потім ретельно промийте розпорошеною водою та просушіть повітрям, що не містить домішок олій.
- Після цього підготуйте фіксаційну поверхню реставрації за допомогою придатного фіксаційного засобу (як-от Monobond® Plus). Обов'язково дотримуйтеся інструкцій із застосування фіксаційного засобу й фіксаційного матеріалу

Додаткові зауваження

Після очищення за допомогою засобу Ivoclean слід повністю уникати забруднення реставрації слиною або кров'ю. У випадку забруднення цими речовинами весь процес підготовки реставрації слід повторити.

Після очищення фіксаційний засіб потрібно знову нанести на поверхні, які раніше було силанізовано й підготовлено.

Застереження

- Спричиняє опіки.
- У разі нещасного випадку або поганого самопочуття негайно зверніться по медичну консультацію.
- Не вдихайте випари/аерозолі.
- У разі контакту з очима негайно промийте великою кількістю води та зверніться по медичну консультацію.
- Використовуйте підходящий захисний одяг, рукавички й засоби захисту очей/обличчя.
- Забороняється їсти й пити під час використання.
- Цей матеріал і контейнер, у якому він міститься, слід утилізувати як небезпечні відходи.

Термін придатності й умови зберігання

- Ivoclean слід зберігати за температури від 2 до 28° С.
- Забороняється використовувати Ivoclean після зазначеного терміну придатності.
- Закривайте пляшку одразу після використання.
- Термін придатності: див. відповідну інформацію на шприцах і упаковках.

Зберігати в недоступному для дітей місці!

Тільки для застосування в стоматології!

Матеріал розроблений виключно для застосування в стоматології. Використання має проводитися тільки відповідно до інструкції із застосування. Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли через неналежне дотримання інструкції або через нецільове використання матеріалу. Користувач несе відповідальність за перевірку матеріалів щодо їхньої придатності та використання для будь-яких цілей, які прямо не вказані в інструкції. Опис і наведені дані не мають обов'язкового характеру та не становлять гарантію властивостей матеріалів.